

# Fauteuil LIBERTY e II

(Fauteuil VHP à pousser à inclinaison électrique)



Le LIBERTY e II permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 4 boutons. Usage intérieur exclusif.

Comme tous les produits INNOV'SA le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables 30° permettant un allègement des points de pression

Le LIBERTY e II est un **produit exclusif** sur le marché, D.M. agréé par le CERAH

## Options :

Appareil de soutien partiel de la tête



Coussin visco Classe II



## Caractéristiques :

- **Autonomie électrique du patient - inclinaison 100% électrique** : Assise / Dossier / Repose jambes synchronisés.
- **Hygiène optimale** : modules de couette **remplaçables, amovibles et lavables** en machine à 30°.
- **Remplacement aisé** des modules de couettes en cas d'usure.
- **Composition de la couette** : garnie de fibre creuse siliconée pour un allègement des pressions.
- **Sécurité** : revêtement PVC/PU non feu M2.
- **Coloris** : 3 types de revêtements disponibles  
**PVC/PU** : Cacao, Ebène, Framboise - **Velours déperlant** : Choco Edition, Black Edition – **Tissu chiné** : Gris Chiné ou Marron Chiné.
- **5 Largeurs d'assise** : 38 cm, 44 cm, 50 cm, 56 cm et **65 cm**.
- **Hauteur sol/siège** : 48 cm
- **Largeur hors tout du fauteuil** : 66 cm (T4), 67 cm (T7), 73 cm (T10), 79 cm (T13), 88 cm (T16)
- **5 Options disponibles** :  
Tablette latérale- Cale tronc ajustable (droit/gauche) – Appareil de soutien partiel de la tête – Coussin Classe II – **Kit Batterie**
- **Poids maximum utilisateur** : 130 kilos
- Livré monté franco à l'unité.
- **Fabrication Française.**
- Poids du fauteuil : environ 38 kg
- **Garanties :**

- Fauteuil : 2 ans
- Vérin : 5 ans

### **Télécommande :**

Télécommande verrouillable

Appuyer 15 secondes sur les deux boutons Blanc et Vert =

La télécommande est verrouillée

Appuyer à nouveau 3 secondes sur les deux boutons Blanc et Vert =

La télécommande est déverrouillée

Les deux premiers boutons permettent de bénéficier de la fonction AUTONOMIE électrique (avant/arrière), permettant de gérer soi-même son inclinaison.

**Bouton BLANC** : Avant

**Bouton VERT** : Arrière

**Bouton BLEU** permet d'actionner le système DETENTE programmé pour modifier automatiquement l'inclinaison de votre fauteuil, permettant ainsi l'apaisement des tensions et les risques de compressions prolongées (douce oscillations – programme de 35 mn)

**Bouton JAUNE** active la fonction MASSAGE par vibrations du coussin lombaire



### **Aide à l'entretien :**

La couette de votre fauteuil est amovible et peut être lavée en machine à 30°. Nous vous conseillons lors du lavage de placer votre couette dans un filet à linge afin de conserver leur aspect d'origine.

La durée de vie prévue du fauteuil est influencée par l'utilisation, le stockage, l'entretien et le nettoyage réguliers.

Afin de garder votre fauteuil INNOV'SA en bon état, vous devez l'entretenir régulièrement de la manière suivante :

- Contrôler et nettoyer les roues. Remplacer celles-ci si nécessaire.
- Vérifier la fixation des vis, les leviers, les boutons de réglage.
- Contrôler les freins.
- Contrôler le fauteuil (propreté fissures, dommages sur les pièces de structure, etc.) et nettoyer-le. Remplacer le revêtement si nécessaire.

### **Caractéristiques techniques :**

Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Largeur hors tout	Hauteur assise	Hauteur hors-tous	Poids du fauteuil	Poids maxi utilisateur
380 mm 440 mm 500 mm 560 mm 650 mm	480 mm	660 mm 670 mm 730 mm 790 mm 880 mm	480 mm	1320 mm	38 kg	130 kg
<b>Normes non feu revêtement PVC/PU : M2 – 1021-1 – 1021-2 et biocompatible</b>						
<b>Normes non feu revêtement Velours et Tissus : 1021-1 – 1021-2 et biocompatible</b>						
Tolérances dimensionnelles et pondérales ± 15mm / 1.5 kg						