

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

INDICATIONS : Ceintures lombaires: Contention et compression en cas de foulure ou d'entorse du bas du dos et de la région abdominale. **Ceintures abdominales:** Contention et compression en cas de foulure ou de faiblesse de la région abdominale. **Ceintures thoraciques:** Contention et compression en cas de fracture ou de foulure de la cage thoracique.

Ceintures lombaires et abdominales:

A) Centrer la ceinture sur le creux des reins. Tirer fermement sur le côté gauche et le passer sur l'avant du corps. Procéder de la même manière pour le côté droit et fixer les fermetures.

Ceintures lombaires avec tirants ou sangles de côté:

B) Mettre la ceinture en place comme à l'étape A. Saisir les tirants/sangles de côté et les tirer fermement vers l'avant. Fixer les fermetures.

Ceintures thoraciques:

C) Positionner la ceinture sur la cage thoracique. Tirer fermement sur le côté gauche et le passer sur l'avant du corps. Procéder de la même manière pour le côté droit et fixer les fermetures. La ceinture thoracique de luxe se ferme à l'arrière.

D) Serrer la ceinture fermement, sans la rendre inconfortable.

UTILISATION ET ENTRETIEN

- Laver manuellement à l'eau froide, avec du savon doux, puis rincer intégralement. LAISSER SÉCHER À L'AIR LIBRE. Remarque: Si le rinçage est insuffisant, le savon résiduel risque d'irriter la peau du patient et de détériorer le matériau.
- Les ceintures thoraciques sont plus efficaces si on les porte sur la peau ou les sous-vêtements.
- Pour les ceintures compatibles avec le raidisseur Comfort-Form, se conformer avec les instructions de chauffage et d'ajustement du raidisseur avant de le placer dans la ceinture.

GARANTIE: DJO, LLC se chargeront de réparer ou de remplacer tout ou partie de l'appareillage et ses accessoires en cas de vice de matériau ou vice de fabrication, pendant une période de six mois à compter de la date de vente.

AVERTISSEMENT : LES CHEVILLÈRES EN NÉOPRÈNE NE DOIVENT PAS ÊTRE PORTÉES PAR DES PERSONNES SUJETTES À LA DERMATITE OU ALLERGIQUES AUX SOUS-PRODUITS DU NÉOPRÈNE.

AVERTISSEMENT: EN CAS DE DOULEUR, D'ENFLURE, D'ALTÉRATION DE LA SENSATION OU DE TOUTE AUTRE RÉACTION ANORMALE LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, SE METTRE EN RAPPORT IMMÉDIATEMENT AVEC LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ CONCERNÉ.

For single patient use only

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.