

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

INDICATIONS : Correction du pied tombant.

AVERTISSEMENT : En cas de douleur, d'enflure, d'altération de la sensation ou de toute autre réaction anormale lors de l'utilisation de ce produit, se mettre en rapport immédiatement avec le professionnel de la santé concerné.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

- A) Avec des ciseaux, couper la section pied en plastique de manière à ce qu'elle s'ajuste bien à l'intérieur de la chaussure.
- B) Placer l'orthèse cheville-pied dans la chaussure.
- C) Glisser le pied dans la chaussure et fixer la sangle supérieure.

UTILISATION ET ENTRETIEN :

- Nettoyer avec un linge humide.
- On peut porter une chaussette à l'intérieur ou à l'extérieur de l'orthèse cheville-pied.

GARANTIE : DJO, LLC se chargeront de réparer ou de remplacer tout ou partie de l'appareillage et ses accessoires en cas de vice de matériau ou vice de fabrication, pendant une période de six mois à compter de la date de vente.

Pour usage sur un seul patient uniquement

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.