

FICHE TECHNIQUE

Code article : MI006219

COLLECTEUR D'AIGUILLES **BIOCOMPACT 5L - DASRI - NFX 30-511**

❖ **Boîtes pour déchets d'activités de soins à risques infectieux et objets coupants, piquants, tranchants**

Conçu pour faciliter son utilisation et l'intégration dans les espaces hospitaliers, en apportant sécurité et conception.

Trois systèmes de dématérialisation des aiguilles (Vacutainer, Venojet et à insuline) pour une utilisation ambidextre et confortable. Une fermeture provisoire rotative pour empêcher la sortie des odeurs et une fermeture définitive facile d'accès. Systèmes de fixation créés pour faciliter l'utilisation mono manuelle, évitant ainsi les situations à risque. Un système de fixation pour chaque besoin: mur, barre ou surface.



❖ **Ergonomique, moderne, fonctionnel**

MODE D'EMPLOI

1. Assemblage : Alignez le couvercle sur le collecteur. Appuyez fortement sur les coins du couvercle jusqu'à entendre « click ».
2. Ouverture : Tournez la partie ronde du couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre « click ».
3. Fermeture provisoire : la fermeture provisoire s'obtient en tournant la partie ronde du couvercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre « click ».
4. Fermeture définitive : Pour obtenir la fermeture définitive, vérifiez que le couvercle soit complètement tourné dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « click » qui indique que la fermeture provisoire a été réalisée. Ensuite appuyez sur la partie centrale jaune, sur les points et dans l'ordre indiqué sur les dessins, jusqu'à entendre les « click » qui indiquent que le couvercle est fermé définitivement.
5. Elimination du matériel : pour effectuer correctement la dématérialisation, ouvrez complètement le couvercle jusqu'à entendre « click ».

NE JAMAIS DEPASSER LA LIMITE DE REMPLISSAGE

CARACTERISTIQUES

- Résistance maximale à la perforation.
 - Triple système de dématérialisation des aiguilles
 - Fermeture provisoire rotative et définitive facile d'utilisation.
 - Haute résistance aux chocs.
 - Système facile de montage du conteneur et du couvercle.
 - Différents supports disponibles (mur, barre et surface).
 - Etiquette personnalisable.
 - Empilables vides et pleins.
 - Autoclavable à 121 ° C pendant 20 minutes avant utilisation.
 - Matière: polypropylène haute résistance aux chocs.
- **ATTENTION : Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets**

1/2

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

www.cristaldistribution.com

DONNEES TECHNIQUES

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ▪ Dimensions | 22 x 22 x 13 cm |
| ▪ Capacité nominale | 5.00 litre |
| ▪ Charge maximale | 2 kg |

NORMES

- Conforme aux normes : NFX30-511 – ISO 23907 :2012
- Conforme pour le transport de matières dangereuses
- **Déchets à éliminer conformément à la réglementation en vigueur**